

So installieren Sie die **XFIL** Handbrause richtig



EINMAL-WASSERFILTER ZUR VERWENDUNG AN WASSERLEITUNGEN

+ BESCHREIBUNG

Die **XFIL** Handbrause Wasserfilter-Modelle werden unsteril geliefert und wurden gemäß ASTM 6908-06 auf einwandfreie Funktion getestet. Die im Filter enthaltene Hohlfasermembran ist für die Entfernung von Bakterien, Protozoen, Pilzen und Partikel aus dem Wasserleitungssystem validiert. Das gefilterte Wasser kann für äußerliche Anwendungen wie die Körperpflege und für den direkten Konsum von Trinkwasser einschließlich der Zubereitung von Getränken oder Speisen verwendet werden. Der Filter sollte maximal entsprechend der Validierungszeit (siehe aufgedruckte Zahl auf dem Filtergehäuse) nach Anbringung verwendet werden.

+ ANBRINGUNG

(Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig!)

Die Empfehlungen für die Anbringung und Nutzung des Filters müssen befolgt werden, um das Risiko einer versehentlichen mikrobiellen Verunreinigung an der Einlass- und Auslassseite der Filtermembran zu minimieren.

+ ANBRINGEN DES FILTERS AM WASSERANSCHLUSS

Der Filter ist mit einem 1/2" Außengewinde versehen. Sollte die Gewindeart nicht kompatibel zu Ihrer Armatur sein, können entsprechende Übergänge beim Lieferanten erworben werden. Bitte entfernen Sie die bisherige Handbrause. Schrauben Sie die **XFIL** Handbrause an den Duschschlauch (Siehe Bilder Montageanleitung).

Das Berühren des Filterauslasses während Anbringung und Verwendung muss vermieden werden.

Schutzkappe am Filtereingang erst unmittelbar vor Anbringung des Filters am Wasseranschluss entfernen.

+ EMPFEHLUNG FÜR DIE FILTERVERWENDUNG

Bakterielle Verunreinigungen des Filtergehäuses sollen möglichst vermieden werden.

Der Filter muss so angebracht werden, dass bei der Verwendung ein Zurückspritzen zum Auslass des Filters möglichst vermieden wird. Auch beim Befüllen von Behältern ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht auf oder an den Filter zurückspritzt. Der Filterauslass darf nicht in das aufgefangene Wasser getaucht werden. Bakterielle Verunreinigungen des

Filterauslasses sind möglich, wenn die äußeren hygienischen Bedingungen nicht optimal sind. Wenn der Filter verschmutzt oder bakteriell kontaminiert ist, sollte er ausgewechselt werden. Im Rahmen von Reinigungsprotokollen können die Außenflächen des Filters mit Desinfektionsmitteln, die Isopropylalkohol enthalten, gereinigt werden. Der Filter darf während der Reinigung und über die gesamte Nutzungsdauer nicht abmontiert werden. Wenn im Rahmen der routinemäßigen Desinfektion des Leitungssystems der Auslass gespült werden soll, kann der Filter eingesetzt bleiben. Bitte beachten Sie diesbezüglich die technischen Filterdaten.

Bei besonderer Belastung des Wassers mit Partikeln (beispielsweise Rost) kann eine Verringerung des Wasserflusses eintreten. Dies kann die Funktionsdauer des Filters beeinflussen und dadurch verringern.

+ WARNHINWEISE

Die Filter werden in einer geschlossenen Folienverpackung geliefert. Bitte verwenden Sie ausschließlich original verpackte Filter. Der Filter ist für einen maximalen Eingangswasserdruck von 5 bar (75 psi) ausgelegt bei einer Dauertemperatur von bis zu maximal 60 Grad Celsius.

Bei thermischen Desinfektionen des Leitungssystems darf die Maximaltemperatur von 70 Grad Celsius über eine Gesamtdauer von insgesamt höchstens 30 Minuten – bezogen auf die gesamte validierte Nutzungsdauer des Filters – nicht überschritten werden.

Der Filter muss spätestens nach Ablauf der Nutzungsdauer (entspricht der auf dem Filter aufgedruckten Ziffer) gewechselt werden.

Während des Gebrauchs darf der Filter nicht entfernt werden, da dies zu einer Kontamination der Auslassseite führen kann. In den Filter eindringende Luft kann die Durchflussrate signifikant beeinflussen. Bei Leckagen ist der Filter zu entfernen, beziehungsweise durch einen neuen Filter zu ersetzen. Bitte melden Sie schadhafte Filter bei Ihrem Lieferanten.

Vermeiden Sie mechanische Einflüsse (drücken und ziehen am Filter), da dies den Filter beschädigen kann.

Gebrauchte Filter können in der Regel dem Restmüll zugeführt werden.

+ KONTRAINDIKATIONEN

Das mit diesem Produkt gefilterte Wasser ist nicht für Injektionen oder Infusionen geeignet. Durch Filtration mit dem **XFIL** Wasserfilter wird weder bewusst noch beabsichtigt die chemische Zusammensetzung des einfließenden Wassers verändert. Der Filter darf nicht an drucklosen oder Niederdruck-Warmwasserbereitern eingesetzt werden.